

opal[®]seal[™]



REKOMENDOWANY JAKO UZUPEŁNIENIE
KLEJENIA ORTODONTYCZNEGO

ZABEZPIECZA ZĘBY PRZED ODWAPNIENIEM

Opal Seal jest **jedynym primerem** zawierającym w 38% glasonomer i nano-cząsteczki absorbujące i uwalniające fluor, **zabezpieczający szkliwo zębów w trakcie całego leczenia ortodontycznego.**



GRAND  ORTHO

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DLA PROFESJONALISTÓW

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

 opal[®]
ORTHODONTICS
by ULTRADENT
PRODUCTS, USA



UZUPEŁNIENIE KLEJENIA ORTODONTYCZNEGO

- Produkt **Opal Seal** uwalnia fluor do zęba oraz absorbuje fluor ze środowiska.
- W 38% wypełniony odżywczym glajsonomerem i nano-wypełniaczami, **Opal Seal** wnika w szczeliny, powodując silne, długo trwające pokrycie i retencję mechaniczną.
- W przeciwieństwie do produktów konkurencyjnych, nie powodująca żółknięcia formuła **Opal Seal** zapewnia półprzeźroczystą i zapobiegającą przebarwieniom metodę leczenia.
- Dzięki zawartości czynnika wysuszającego, chroniącego przed wilgocią i wprowadzeniu w szklivo żywicy zawierającej fluor, **Opal Seal** zapewnia nie tylko udoskonalone klejenie, ale także absorpcję fluoru.
- Ponieważ zawiera właściwości fluorescencyjne, **Opal Seal** jest wykrywalny w świetle ultrafioletowym dla ułatwienia jego usunięcia lub ponownej aplikacji. Zastosowanie światła ultrafioletowego na powierzchni zęba powoduje świecenie produktu **Opal Seal** i z łatwością odróżnia go od szkliva.
- **Opal Seal** cechuje specjalnie zaprojektowana, jednorazowa końcówka, która wykorzystuje spiralny kanał do dokładnego i oszczędnego wypełnienia żywicą, tak aby utworzyła cieką, jednolitą warstwę.
- Kompatybilny z każdym systemem klejenia.

KLEJENIE - INSTRUKCJA UŻYCIA OPAL SEAL



1a. DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ




1b. OBFICIE SPŁUKAĆ



2. DOKŁADNIE WYSUSZYĆ



3a. WYTRAWIĆ. UNIKAĆ KONTAKTU Z DZIAŚŁAMI

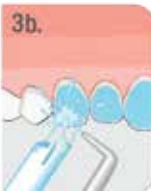

3b. OBFICIE SPŁUKAĆ



4. WYSUSZYĆ. DOBRZE WYTRAWIONE SZKLIWO POWINNO BYĆ JAK KREDA



5. NAŁOŻYĆ ŚCIŚLE KONCÓWKĘ OPAL SEAL




6a. NAŁOŻYĆ CIENKĄ WARSTWĘ OPAL SEAL



6b. 2-SEKUNDOWY DELIKATNY STRUMIEN POWIETRZA NA KAŻDY ZĄB



7. WSTĘPNIE NASWIETLIĆ (OPCJONALNIE)

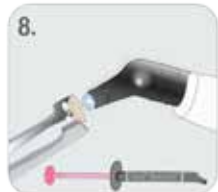

8. ROZPROWADZIĆ KLEJ NA ZAMEK



9. PRZYKLEIĆ ZAMEK



10. USUNĄĆ NADMIAR KLEJU



11. NASWIETLIĆ

GRAND ORTHO

NAPRAWIĄ JAKOŚĆ DLA PROFESJONALISTÓW

opal
ORTHODONTICS
BY ULTRADENT