

ahh...way better

# GISHY GOO!

ŚWIETNY sposób, aby pacjent czuł się komfortowo nosząc zamki!

- Redukuje koszty nieplanowanych wizyt
- Utrzyma się na swoim miejscu lepiej niż wosk
- Gwarantuje trwały komfort ust i policzków
- Działa do 12 godzin



ahh...way better

# GISHY GOO!

Gishy Goo™ jest wyspecjalizowaną formułą elastomeru poliwinylsiloksanu, który pomaga pacjentowi poradzić sobie z przejściowymi niedogodnościami związanymi z noszeniem zamków, rurek, pierścieni, stałych aparatów i wszystkich innych elementów ortodontycznych, które mogą drażnić tkanki miękkie.



- 1** Wyciśnij niewielką ilość Gishy Goo™ ze strzykawki prosto na palec.



- 2** Mieszaj obydwie pasty w palcach przez około 7 sekund. Nie czekaj zbyt długo, gdyż może stwardnieć.



- 3** Nałóż zmieszaną masę Gishy Goo™ na drażniące zamki. Gishy Goo™ wiąże po ok. 2 minutach.

Dostępne w zestawach:

500-059 - Strzykawka uzupełniająca Gishy Goo!  
**w kolorze zęba** - 10 opak.

Termin ważności: 24 miesiące.

2749 - Strzykawka Gishy Goo! Econo  
**w kolorze zęba** - 50 opak.

Termin ważności: 24 miesiące.

